


Patient Alert

Le Patient Alert (Alerte Patient) est une aide destinée aux seniors et aux personnes connaissant des difficultés physiques. Un signal sonore s'active lorsque l'on tire légèrement sur un cordon, prévenant que le patient a besoin d'assistance ou d'aide. L'Alerte Patient peut s'attacher facilement à un fauteuil roulant grâce à l'étui fourni avec l'appareil ou s'attacher sur un côté ou sur une tête de lit grâce au clip et à la sangle avec scratch.

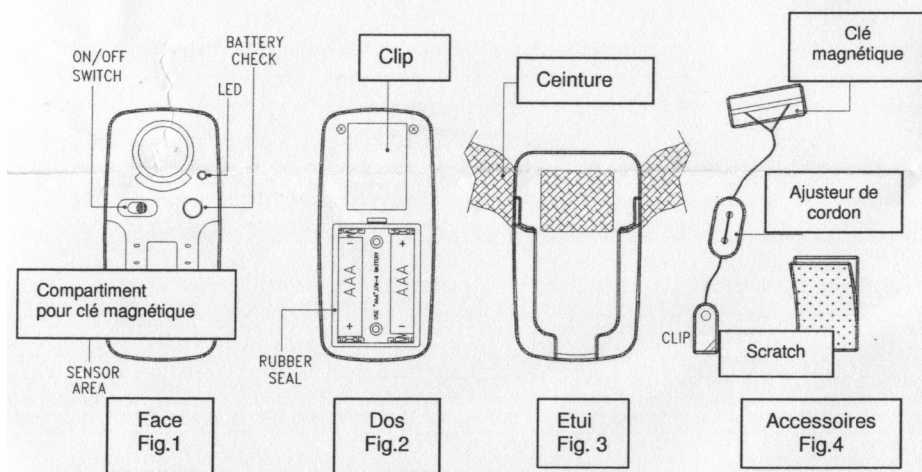

Importateur:
Lifemax Ltd, The Business Centre, Brimpton Lane, Brimpton, Reading, RG7 4TN, Angleterre

Instructions d'utilisation

Informations sur les piles:

1. L'appareil fonctionne avec 2 piles 'AAA' (non fournies)
2. Pour insérer les piles:
 - a. Enlever les deux vis situées sur le couvercle des piles. Veuillez faire très attention à ne pas enlever la languette en caoutchouc
 - b. Insérez les piles. Durant l'insertion, respectez la polarité (+/-) indiquée sur l'appareil et veillez à ne pas mélanger plusieurs types de piles.
 - c. Remettez le couvercle des piles ainsi que les deux vis. Veuillez faire très attention au positionnement de la languette en caoutchouc. Ne forcez pas sur les vis.

Comment utiliser l'appareil :

1. Un étui destiné à être attaché à un fauteuil roulant ou tout autre équipement est fourni avec le Patient Alert. Passez la ceinture dans l'étui comme décrit Fig. 3.
2. Un clip et une attache scratch sont également disponibles pour attacher facilement l'appareil à une surface telle qu'une tête de lit.
3. Placez la clé magnétique dans le petit compartiment placé à l'avant de l'appareil (Fig. 1). Mettez en marche l'appareil en positionnant le bouton ON/OFF sur LO (pour un son faible) ou HI (pour un son fort).
4. Reliez le patient avec l'appareil en utilisant le clip au bout du cordon. Faites attention à ce que le cordon ne s'emmêle pas avec le patient et ne puisse pas l'étrangler. Ajustez le cordon à la longueur désirée grâce à l'ajusteur.
5. En tirant sur la corde la clé magnétique chutera de son compartiment et déclenchera l'alarme. L'alarme sonnera pendant des cycles de 3 secondes puis s'arrêtera pendant 2 secondes afin d'éviter un désagrément pour le patient.
6. Arrêter l'alarme, soit en replaçant la clé magnétique dans son compartiment, soit en éteignant l'appareil en positionnant le bouton sur OFF.

Tester l'état des piles:

1. Allumez l'appareil. Retirez la clé magnétique de son compartiment pour réaliser une vérification sonore de la sonnerie de l'alarme, ou,
2. Appuyez sur le bouton « Battery check » et jugez de la luminosité de la LED qui indique l'état des piles

Attention : Un cordon trop long peut étrangler le patient et être potentiellement dangereux. Appareil à utiliser avec précautions et sous surveillance. Le son de la sonnerie est fort ; éloignez l'appareil de vos oreilles pour éviter toute perte d'audition.

Les produits portant le symbole d'une poubelle à roulettes barrée, comme illustré ci-après, sont des équipements électriques et électroniques. Ce symbole indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne peuvent pas être mis au rebut avec le reste des déchets ménagers, mais doivent être collectés séparément, conformément aux législations et réglementations locales en vigueur.

Conservez ces informations

