

# MEM-X



Votre nouvel allié  
dans la prise en charge de la  
maladie d'Alzheimer



## L'AIDE-MÉMOIRE QUI VOUS PARLE EN UN CLIC !

**Votre MEM-X sonne :**  
un simple clic sur le  
bouton bleu et MEM-X  
vous dit quoi faire !

**MEM-X** est un **AIDE-MÉMOIRE VOCAL** pour pallier de fréquentes pertes de mémoire lorsque trop de choses sont à mémoriser.

**MEM-X** est tout indiqué pour aider, soutenir et rassurer à distance une personne âgée. En effet pour être efficace, une consigne doit être vocale et à effet immédiat.

Mieux qu'un agenda ou des notes adhésives, **MEM-X, AIDE-MÉMOIRE VOCAL** est là. Il vous alerte aux dates et heures programmées, et vous rappelle, par une voix familière préenregistrée, ce que vous devez faire au quotidien : calendrier des événements, prise de médicaments, etc.



[www.mem-x.fr](http://www.mem-x.fr)



COMPACT ET TRÈS LÉGER, **MEM-X** COMPORTE **UN SEUL BOUTON VISIBLE** POUR L'ÉCOUTE DES MESSAGES.



# MEM-X



## Comment utiliser MEM-X ?

- À l'avant, l'ÉCOUTE - simple et rassurante - est à l'usage de l'utilisateur.
- À l'arrière, la PROGRAMMATION :  
une trappe amovible dissimule le programmateur.  
Il est destiné à la personne qui effectue à l'avance, de façon régulière, la programmation des consignes, en fonction des besoins.

**MEM-X, votre AIDE-MÉMOIRE VOCAL, enregistre à l'avance des messages à dates et heures programmées.**

- **Messages fixes** (tous les jours, à heure fixe, sur une période déterminée) :  
« Maman, il est l'heure de te préparer pour la visite de ton aide-ménagère. »
- **Messages réguliers** (pour un jour de la semaine) :  
« C'est aujourd'hui mercredi, tu dois à aller chez le kiné, recevoir les petits,... »
- **Messages ponctuels** : « C'est aujourd'hui l'anniversaire de Bertrand, la fête de Juliette... »

## Comment programmer MEM-X ?

Il suffit simplement d'ouvrir la trappe et :

1



La date et l'heure s'affichent.  
le menu est déroulant

2



Choisir le type de message.  
la date et l'heure grâce au clavier

3



Après l'enregistrement,  
le message se répète pour contrôle

4



MEM-X sonne,  
appuyer sur le bouton bleu pour écouter