



REF	Description	Size	Unit
912420	Sensory Stimulator Gel Pad	7" x 16"	Each


Purpose

SkiL-Care's Sensory Stimulator Gel Pad contains water-based gel and colorful stars that move through the gel as the pad is handled or touched. It is intended to calm agitated, diminished-capacity individuals by providing tactile and visual stimulation.

Easy to Use

The gel pad may be placed on a table top or given to an individual seated in a chair. Its soothing effect may decrease restlessness for some diminished-capacity individuals, thereby reducing wandering or chair exits.

The Sensory Stimulator Gel Pad may be heated in warm water to sooth arthritic fingers. Do not heat the gel pad beyond 110°F (43°C). Do not place the gel pad in a microwave.

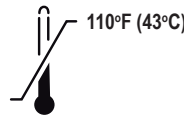

Easy Care

The gel pad may be cleaned with a spray-and-wipe cleanser and disinfected with a mild, non-chlorine disinfectant.

Voir au verso pour la traduction française



N° Réf	Description	Taille	Unité
912420	Coussin Gel Pad pour la stimulation sensorielle	17.8cm x 40.6cm	À l'unité

Objectif

Le coussin de stimulation sensorielle de Skil-Care contient un gel à base d'eau et des étoiles colorées qui se déplacent dans la matière gélifiée lorsque celui-ci est manipulé ou touché.

Facile à Utiliser

Le coussin peut être disposé sur une table ou manipulé par l'individu lorsqu'il est assis sur une chaise. Créant une sensation apaisante, il contribue à diminuer l'agitation dont souffrent certains individus aux capacités diminuées, réduisant par là même leur envie de quitter le fauteuil ou d'errer.

Le stimulateur sensoriel Gel Pad peut être réchauffé en le plaçant dans de l'eau chaude afin de soulager les douleurs dues à l'arthrite, au niveau des doigts.

Le coussin ne doit pas être réchauffé à une température supérieure à 43°C. Ne pas mettre le coussin au micro-ondes.



Entretien facile

Le coussin peut être lavé à l'aide d'un produit nettoyant en spray (à essuyer) et désinfecté avec une substance ne contenant pas de chlore.